

# MagniLink iTAB



# Allt-i-ett-lösning för iPad

MagniLink iTAB är en portabel och flexibel läskameralösning för iPad. Denna kombination blir ett mångsidigt och användbart synhjälpmedel i kompakt format som är enkelt att ta med sig överallt. Med tillvalet AI erbjuds en mängd användbara funktioner.

## Kompakt lösning för iPad

MagniLink iTAB är utvecklad för och ansluts direkt till Apples iPad-modeller via USB-C-kontakten. Det vinklingsbara stativet för iPaden gör användningen ergonomisk och en extra kontakt möjliggör laddning av iPaden medan systemet används. MagniLink iTAB kan levereras med en läs-/och avståndskamera med fantastisk bildkvalitet, men du kan också ansluta en MagniLink läskamera\*, om du redan har en sådan. Tillsammans med iPaden (ingår ej) blir detta ett mångsidigt synhjälpmedel!

Det smidiga formatet passar utmärkt för den som vill kunna använda sitt system på olika platser, t ex i hemmet och på arbetsplatsen, men kanske framförallt i skolan. Det går utmärkt att dela bilden på skärmen så att man samtidigt kan läsa ur en bok eller annan tryckt text med hjälp av iPadens kamera – och ta del av informationen på en whiteboard i klassrummet med iTabs avståndskamera. Det går även att dela bilden med andra applikationer på iPaden.

## Alternativa lösningar för iPad

För den som vill eller behöver kunna ansluta trådlöst till sin iPad finns även MagniWifi och MagniLink WifiCam. Läs mer om dessa lösningar på [www.lvi.se](http://www.lvi.se).

## Mjukvara med många möjligheter

Hjärtat i systemet är MagniLink Viewer, vår egenutvecklade mjukvara, som enkelt laddas ned från App Store. Mjukvaran erbjuder olika visningslägen som ger ökad läshastighet, läsuthållighet och en mer avslappnad läsning. Du kan också ta del av såväl digitala som tryckta dokument. OCR-funktion ingår alltid, vilket ger möjlighet att få både tryckt och digital text uppläst. Detta är en mycket uppskattad funktion för den som tycker att läsning är ansträngande.

MagniLink Viewer stöder iPadens pekskärm och det går utmärkt att styra systemet med fingrarna på skärmen, men också med hjälp av snabbkommandon via ett Bluetooth-tangentbord.

## Kompetent kombination

Tillsammans med iPadens egna appar får du här ett mycket komplett och kompetent system med mängder av användningsområden.





### Ännu enklare med AI

Med tillvalet AI erbjuds flera användbara funktioner, t ex kan du få en tryckt text översatt eller sammanfattad. Scanna för att läsa mer.

## Modellöversikt\*

ML-iTAB-SC-13PRO	Ja	Ja	iPad Pro 13"
ML-iTAB-S-13PRO	Ja	Nej	lpad Pro 13"
ML-iTAB-SC-12,9	Ja	Ja	lpad Pro 12,9" **
ML-iTAB-S-12,9	Ja	Nej	lpad Pro 12,9" **
ML-iTAB-SC-11	Ja	Ja	iPad Pro 11" **
ML-iTAB-S-11	Ja	Nej	lpad Pro 11" **



Med kamera



Utan kamera

\*iPad ingår ej utan köps separat. Notera att MagniLink iTAB kräver en nyare iPad med specifika systemkrav. För uppdaterad information om minimikrav, se vår hemsida: [lvi.se/catalog/products/magnilink-itab](https://lvi.se/catalog/products/magnilink-itab). Väljer man en MagniLink iTAB utan kamera kan vissa MagniLink kameror användas, t ex en MagniLink S, tillverkad från 2021-11-01.

## Teknisk specifikation

### MagniLink iTAB

<b>Vikt</b>	3,0 kg
<b>Dimensioner</b>	Ihopfällld: 36,5 x 30 x 3 cm Uppfällld: 23 x 31 x 35 cm

### Extern kamera

<b>Förstoring</b>	0,9-50x (höjd 33 cm, iPad Pro 12,9")
<b>Bildfrekvens</b>	60 Hz
<b>Längd</b>	Kamera och arm: 62 cm
<b>Vikt</b>	700 g



LVI Low Vision International är en av världens ledande tillverkare av synhjälpmedel med uppdrag att göra vardagen enklare för människor med synnedsättning.

Vi är certifierade enligt ISO 14001 & 9001



**Intertek**



LVI Low Vision International  
Verkstadsgatan 5  
352 46 Växjö, SWEDEN  
Tel: +46 (0)470 72 77 00  
Fax: +46 (0)470 72 77 25  
E-mail: [info@lvi.se](mailto:info@lvi.se)

[WWW.LVI.SE](http://WWW.LVI.SE)